

Instrukcja użycia

【Nazwa produktu】 Sterylne igły motylkowe jednorazowego użytku do pobierania krwi

【Specyfikacja】

Ø Model B

Wymiar zewnętrzny igły: 0,5 mm (25G), 0,55 mm (24G), 0,6 mm (23G), 0,7 mm (22G), 0,8 mm (21G), 0,9 mm (20G);


Długość igły: 25 mm ~ 40 mm;

Przykład: średnica zewnętrzna igły wynosi 20G, długość igły wynosi 25 mm, będzie oznaczona jako B 20Gx25mm;

Strukturę i komponenty pokazano na rysunku 1.

【Struktura produktu】

Schematyczne przedstawienie sterylnych igieł motylkowych jednorazowego użytku do pobierania krwi:

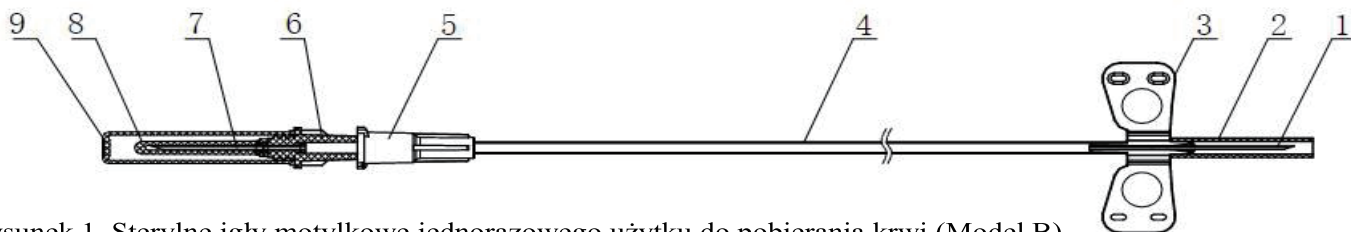

Rysunek 1. Sterylne igły motylkowe jednorazowego użytku do pobierania krwi (Model B)

1. Iгла do pobierania krwi 2. Nasadka igły 3. Uchwyt 4. Wężyk 5. Nasadka igły 6. Nasadka stożkowa typu Luer 7. Iгла nakłuwająca korek 8. Gumowa uszczelka 9. Nasadka ochronna (opcjonalnie)

【Przeznaczenie】

Sterylne igły motylkowe jednorazowego użytku są przeznaczone do użytku medycznego z probówkami próżniowymi do pobierania próbek krwi żylniej. W celu pobrania próbki nakłuwana się żyłę pacjenta w celu pobrania próbek krwi w systemie zamkniętym, próżniowym, bezpośrednio do probówki.

Zestaw można użyć tylko raz i po użyciu należy go wyrzucić jako odpad medyczny.

【Docelowi użytkownicy】

Doświadczony personel medyczny w pobieraniu krwi w systemie próżniowym.

【Przeciwwskazania】

1) Pacjenci wrażliwi na pobieranie krwi lub widok krwi, u których wystąpiły omdlenia z tym związane, osoby z chorobami serca i nadciśnieniem.

【Uwagi i ostrzeżenia】

- 1) Przed użyciem sprawdź opakowanie; Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- 2) Zwróć uwagę, czy w opakowaniu nie ma żadnych obcych substancji lub zanieczyszczeń oraz czy nasadka na igłę jest na swoim miejscu, jeśli nasadka spadła, nie należy stosować produktu.
- 3) Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i nie powinien być używany ponownie. Ponowne użycie produktu może doprowadzić do zakażenia lub infekcji.
- 4) Iglę należy użyć bezpośrednio po otwarciu opakowania i po użyciu usunąć ją jako odpad medyczny;
- 5) Iglę należy użyć przed upływem terminu ważności oznaczonego na etykiecie. Okres trwałości produktu wynosi 5 lat. Nie stosować produktu, jeżeli upłynął termin przydatności do użycia.
- 6) Wtórna sterylizacja tego produktu jest surowo zabroniona.
- 7) Podczas pracy należy uważać, aby nie zakłuć się igłą.
- 8) Sprawdź, czy poszczególne części łączące igłę nie odpadły lub poluzowały się, w razie potrzeby dokręć je.
- 9) Przed użyciem upewnij się, że końcówka igły nie jest uszkodzona lub nie ma żadnych zadziorów. Jeśli tak, nie używaj jej.
- 10) Ten produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

【Potencjalna reakcja niepożądana】

- 1) Ból;

2) Krwawienie w miejscu pobrania krwi;

3) Urazy naczyńniowe;

4) Zaczernienie.

【Jak używać】

1) Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy osłonka nie odpadła;

2) Otwórz opakowanie „Open Here”, wyjmij igłę;

3) Zdejmij osłonkę luer adaptera i wkręć w uchwyt;

4) Zdejmij osłonkę z igły pobraniowej i natychmiast wykonaj nakłucie żyły;

5) Wsuń probówkę w uchwyt na drugim końcu wężyka, tak aby igła z gumową osłonką przebiła korek probówki, w tym momencie następuje pobranie próbki krwi, dzięki próżni znajdującej się w probówce;

【Sterylizacja】 Sterylizacja EO (tlenek etylenu).

【Okres trwałości】 5 lat.

【Znaki i symbole używane na etykietach】

Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Znak towarowy producenta		Kod partii		Kraj produkcji, data
	Data przydatności do spożycia		Sterylizowane tlenkiem etylenu		Uwaga
	Nie używać ponownie		Nie używać jeśli opakowanie jest zniszczone		Urządzenie medyczne
	Nie sterylizować повторно		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Producent
	Oznakowanie zgodności CE i kod jednostki notyfikowanej		Sprawdź instrukcje obsługi		Unikalny identyfikator urządzenia
	Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych		Przechowywać w stanie suchym		System pojedynczej bariery sterylnej
	Delikatne, należy zachować ostrożność		Importer		

【Warunki przechowywania】

Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu z dobrą wentylacją, bez żrących gazów.

【Warunki transportu】

Podczas normalnego transportu produkt należy chronić przed wieszaniem, dużym naciskiem i deszczem.

【Producent】

 Name: Berpu Medical Technology Co., Ltd.

Address: No. 14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District, 325000 Wenzhou, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

【Przedstawiciel w Europie】

 Name: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Biomedico, Oliwkowa 21/5, 81-589 Gdynia
www.biomedico.pl Tel: +48 733 400 306

 0123