

Instrukcja obsługi

Kołnierz miękki typu Schantza

Kod produktu: TGO-C KS 101



Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie

Jednoczęściowy miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie obszytej bawełną. Lekki i komfortowy w użytkowaniu, zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta, przepuszczalny dla promieni RTG.

3. Zastosowanie

Kołnierz ortopedyczny należy do wyrobów medycznych stosowanych w unieruchomieniu i stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Możliwe zastosowanie:

- Zawroty głowy, migreny
- Ostre i chroniczne syndromy bólesności szyi
- Zwyródnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
- Choroby reumatyczne kręgów szyjnych
- Po przebytym urazie w przebiegu dystorsji
- W leczeniu uzupełniającym po urazach żuchwy

4. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających
- Indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym

5. Uwagi i zalecenia

- **Uwaga!** Nie należy stosować wyrobu bez konsultacji lekarskiej.
- **Uwaga!** Wyrób należy stosować ściśle według zaleceń lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.
- **Nie należy stosować** wyrobu w przypadku przeciwwskazań wymienionych w pkt. 4.
- **Uwaga!** Aby wyrób spełniał swoją funkcję musi być odpowiednio wyregulowany oraz właściwie dobrany pod względem rozmiaru. Zbyt luźny lub zbyt ciasny może powodować otarcia naskórka.
- **Uwaga!** Należy pamiętać, że długotrwałe użytkowanie kołnierza może doprowadzić do osłabienia mięśni szyi, dlatego czas stosowania w procesie leczenia powinien być systematycznie skracany i określony przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, który posiada odpowiednie kwalifikacje medyczne.
- **Uwaga!** Nie należy stosować wyrobu dłużej niż 3-4 godziny dziennie, ze względu na możliwość osłabienia mięśni szyi.
- **Uwaga!** W przypadku zmian na skórze w miejscu przylegania (otarcia, egzemy, rany) przed zastosowaniem wyrobu należy założyć opatrunek.
- **Uwaga!** Należy systematycznie kontrolować stan wyrobu i niezwłocznie zgłosić do punktu sprzedaży wszelkie uszkodzenia budzące wątpliwości, co do bezpieczeństwa korzystania z wyrobu.
- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych.

UWAGA: Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Sposób zakładania

Uwaga! Nie należy korzystać z wyrobu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń.

Uwaga! Podczas zakładania i regulacji kołnierza należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z silnymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku szyjnym i o obniżonej sprawności ruchowej mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

- Przed założeniem należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.
- Kołnierz należy zakładać w pozycji siedzącej, odchylając nieznacznie głowę w tył i unosząc podbródek w górę.
- Kołnierz należy założyć w taki sposób, aby wycięcie anatomicznie znajdowało się pod podbródkiem, następnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep zabezpieczyć tył kołnierza.
- Pamiętaj, że jedynie właściwie dobrany rozmiar kołnierza gwarantuje stabilizację i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa.

7. Parametry techniczne:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu szyi oraz ustalić wysokość kołnierza, a następnie wybrać rozmiar.

ROZMIAR	OBWÓD SZYI (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)		
S	30-35	7,5	8,5	10
M	36-41			
L	42-47			
XL	48-53			

8. Konserwacja

- Kołnierz prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Uwaga! Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

Uwaga! Należy pamiętać, że brak higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia lub inne uszkodzenia, a także dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

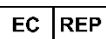
9. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

11. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne

- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwośluzynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

**Wytwórca:**

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com:



Wydanie I, data aktualizacji 29.07.2016